

LZH Reinigungsset -Gebrauchsanweisung-

Reinigungstücher

1. Die feuchten Reinigungstücher wurden speziell für die Reinigung Ihres Hörgerätes und Ihres Ohrstückes entwickelt. Die regelmäßige Anwendung erhöht die Lebensdauer und den Tragekomfort Ihres Hörgerätes. Das Hörgerät und das Ohrstück gründlich mit dem Tuch abreiben. Die Oberfläche vor dem einsetzen trocknen lassen.
Vor Gebrauch innenliegende Packung öffnen (Austrocknungsschutz).

Darf nicht in Hände von Kindern gelangen!

Trockenkapseln

1. Öffnen Sie bei Ihrem Hörgerät das Batteriefach und entnehmen Sie die Batterie!
2. Trockenkapsel aus der Verpackung nehmen und in den Trockenbecher legen. Der Becher muss absolut trocken sein!
3. Hörgerät in den Becher legen und gut verschließen. Am besten Sie lassen es über Nacht trocknen. Die Häufigkeit des Trockenvorgangs ist von der Umgebungsfeuchtigkeit (Luftfeuchtigkeit, Schweißbildung) abhängig. (Die Trockenkapsel kann bis zur Verfärbung des Indikators verwendet werden. Wenn sich die Farbe der Kapsel ändert, bitte im Hausmüll entsorgen und eine neue verwenden.)
4. Nach dem Trocknungsvorgang das Hörgerät aus dem Becher nehmen und die Batterie wieder einsetzen.

Achtung! Trockenkapsel/-granulat nicht entnehmen! Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen! Trockenkapsel nicht einnehmen!

Reinigungstablette (nur für HdO Hörgeräte)

1. Trennen Sie das Ohrstück vom Hörgerät.
2. Becher oder Glas mit ca. $\frac{3}{4}$ lauwarmen Wasser füllen und eine Reinigungstablette hinzufügen.
3. Legen Sie das Ohrstück in die Flüssigkeit. Nicht das Hörgerät! Lassen Sie es mindestens 15-30 Minuten, bei Bedarf auch mehrere Stunden (je nach Vermutung) im Reinigungsbad.
4. Danach das Ohrstück herausnehmen und unter fließendem Wasser abspülen.
5. Ohrstück abtrocknen.
6. Den Schlauch und die Bohrung mit dem Puster kräftig durchblasen. Es darf keine Flüssigkeit am Ohrstück zurückbleiben!
7. Ohrstück und Hörgerät anschließend wieder zusammenstecken.

Reinigungsbad nicht wieder verwenden. Achtung! Tabletten nicht einnehmen! Darf nicht in Hände von Kindern gelangen!

